


体液を吸収し、漏出を防止するセーフティセットプラス

M 6012 セーフティセットプラス 小児用

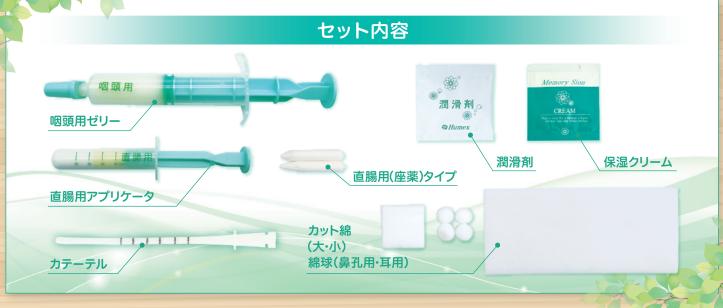



#### **DISPOSABLE ANTI-CONTAGIOUS PLUGGINGS**

This is only for a human corpse:Do not use any other bodies.


## ・フティセットプラス

小児用

体重2,500g以上の新生児~乳幼児が対象となります。 (体重2,500g未満の低体重児にはご使用できません)

### 特長

### セット内容

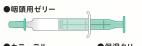

●保湿クリーム ●カテーテル ●直腸用アプリケータ

●カット綿(大・小)

綿球(鼻孔用·耳用)

●直腸用(座薬)タイプ

●潤滑剤


### 咽頭用

- ●口・鼻からの体液漏出を防止します。 ●ゼリー化されているために流動性が
- 良く、簡単に注入できます。 ●咽頭部へ注入したゼリーが胃液や胸水 を吸収し、体液の漏出を防止します。 ※ゼリー注入により、臭いも軽減されます。



#### 直腸用

●綿球、吸収剤、吸収繊維の3層構造で 二重に漏出を止める特長があります。

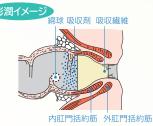

新看護学7基礎看護[2]/著者代表 伊藤明子 参照

### 保湿クリーム

お顔などの保湿にお使いください。



(内容量3g)

### 使用方法

#### 咽頭用

※処置を行う際は、ご遺体を仰向けの状態にしてください。

1 シリンジのキャップを回して はずします。




シリンジの突起部分をカテーテルの溝に 押し込み、接続します。

※カテーテル挿入後に接続しても構いません。



4 潤滑剤をカテーテルの 先端部分に塗布します。

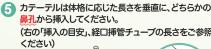

※鼻孔からの カテーテル な場合は、口から挿入



😱 気道確保の形を取ります。



6 ゼリーの注入量は体格に応じて 調整してください。

> ※注入の際は、ゆっくりと一定の速度で 注入してください。



#### 挿入の目安

経口挿管チューブの長さ(身長÷10cm)

『臨床小児麻酔ハンドブック』 P362・P395 監修: 屋頂委中 出版:治療と診断社(2003年出版)参照



セーフティセットプラスには 20mlのゼリーが入っています 体格によって注入量を設定してください。

※ゼリーは分けて使用しないでください。 ※残ったゼリーは処分してください。

### 直腸用アプリケ-

潤滑剤

直腸用アプリケータの挿入が困難な場合は、直腸用(座薬)タイプを お使いください。



外筒を、右の「挿入の目安」を参考に 目印まで直腸へ挿入してください。



「挿入後、外筒を引き抜いてください。



内筒をすべて押し込んで挿入

(挿入の目安)

乳幼児の浣腸時に使用するカテーテルの 深さを参考に、挿入してください。



#### 直腸用(座薬)タイプ

潤滑剤を先端部分にまんべん なく塗布し、直腸へ挿入します。 (1~2本)



#### カット綿(大・小) 綿球(

ゼリー注入後、最後に綿球を鼻孔へ挿入してください。カット綿は必要に応じてご使用ください。







※ご遺体以外には絶対に使用しないでください。※ご遺体の損傷が著しい場合、本品が機能しないことがあります。※セーフティセットプラスは特許取得製品です。

製造販売元

# *〒 Humex* 株式会社ヒュー・メックス

本 社

〒733-0012 広島市西区中広町三丁目3-21 TEL.082-532-0361 FAX.082-295-6284

工場

FAX.0829-38-7304

〒738-0039 広島県廿日市市宮内工業団地3-2 TEL.0829-38-7303

http://www.hum.co.jp/

代理店