

エンゼルケア用品 アプリケーター Safetyset^{plus} セーフティセットプラス

体液を吸収し、漏出を防止するセーフティセットプラス

ご遺体の体液、血液には感染を引き起こす可能性があります。漏出を防止することで、故人の尊厳を守り
ご遺族にさらなる悲嘆を与えないとともに、ご遺体に関わる全ての方への感染リスクを減らすことに繋がります。

1. 早い

短時間で処置ができ、ご家族にお待ち
いただく時間も短くなります。

5つの特長

2. 簡単

処置の個人差がほとんどなく、
どなたでもスムーズに処置が行えます。

3. 安心

特殊な高分子吸収剤を使用しており、
体液を吸収し膨潤することで漏出を防ぎます。

4. 消臭

臭いを吸収する特殊な高分子吸収剤を使用しており、
消臭効果があります。

5. 安全

万が一触れても安全な材料を使用しており、
環境の整った自社工場で生産しております。

..... 自社工場での生産の様子

衛生面に注意を払い、清潔な場所で一本一本丁寧に生産しています。



▲専用の充填機で一本ずつ丁寧に充填しております。



▲衛生面に注意を払い、清潔な場所で組立てをおこなっております。

全国

2,370施設で
使用されています

※2024年度実績

「セーフティセットプラス」は
(株)ヒュー・メックスの
オリジナル製品です。

セーフティセットプラス アプリケーター 製品について



セット内容

●咽頭用ゼリー




●カテーテル




●潤滑剤



●直腸用アプリケーター

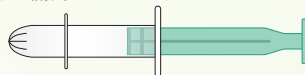

●口腔用ゼリー入りカット綿
綿球（鼻孔用・耳用）

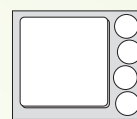


【咽頭用の特長】

- 口・鼻からの体液漏出を防止します。
- ゼリー化されているために流動性が良く、簡単に注入できます。
- 咽頭部へ注入したゼリーが胃液や胸水を吸収し、体液の漏出を防止します。

※ゼリー注入により、臭いも軽減されます。


注入イメージ

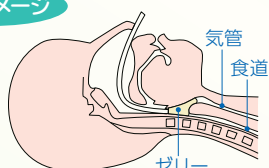

【直腸用の特長】

- 綿球、吸収剤、吸収繊維の3層構造で二重に漏出を止める特長があります。

膨潤イメージ

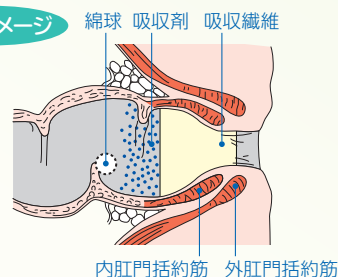


新看護学7 基礎看護[2] / 著者代表 伊藤明子 参照

使用方法

咽頭用


※処置を行う際は、ご遺体を仰向けの状態にしてください。

1 シリンジのキャップを回してはずします。

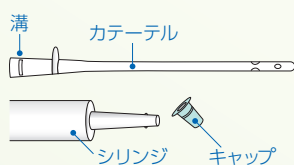

2 シリンジ突起部分をカテーテルの溝に押し込み、接続します。


※カテーテル挿入後に接続しても構いません。

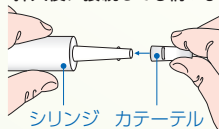

3 気道確保の形を取ります。




4 潤滑剤をカテーテルの先端部分に塗布します。

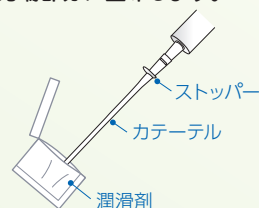


5 カテーテルはご遺体の顔面に対し垂直に、どちらかの鼻孔からストッパーまで挿入します。

※鼻孔からのカテーテル挿入が困難な場合は、口から挿入してください。

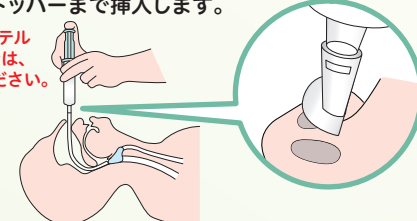

6 シリンジの中のゼリーをゆっくりと全量注入してください。

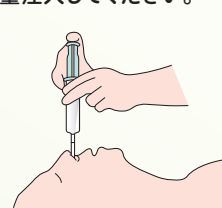


直腸用・腔用


1 潤滑剤を外筒先端部分に塗布します。



2 外筒をストッパーまで直腸(腔)に挿入してください。

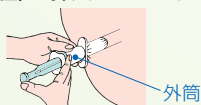

3 内筒をすべて押し込んで挿入してください。

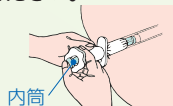

4 挿入後、外筒を引き抜いてください。




口腔用ゼリー入りカット綿

頬の落ち込みのあるご遺体にご使用します。

綿球（鼻孔用・耳用）

ゼリー注入後、最後に鼻孔へ挿入してください。

※耳へは必要に応じてご使用ください。

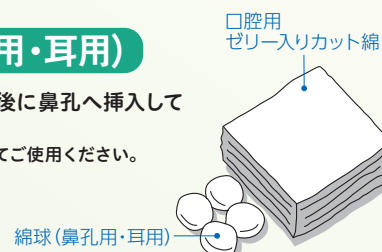

エンゼルケア ご遺体からの体液漏出と感染について

ご遺体の安置されている環境（温度や時間）を考慮した場合、体液の漏出を予測する事は難しいのが現状です。

医療施設で亡くなられたご遺体は搬送時等に必ずしも平行な状態で移動できるとは限りません。車の振動や傾斜、ご自宅の階段、エレベーターの無い環境等で物理的に体液が漏出する可能性を考える必要があります。

また、ご遺体から漏出する血液・体液・排泄物は死亡時に検査をされていないことが多く、病原体の種類・数・増減する時間を把握することができません。宿主の死亡後のウイルスや細菌の増減を測ることはほぼ不可能であり、どんな病原体がどれだけ存在するのかわかりません。よって、**ご遺体から出る漏出液への接触は感染のリスクが高いと言えます。**

故人に関わる全ての方々が安心してお見送りする為には医療施設を起点とした適切な処置と対策が必要です。

ご使用されている方の声

綿を詰めるより簡単で時間も短縮できて非常に重宝しております。

綿を詰めるときに傷つけてしまうのではないかとつらい思いをしていました。この商品を使いだして精神的にも楽になりました。

今までは、病院から出られた後に体液が漏れないか不安でしたが、高分子吸収剤は体液を継続的に吸収してくれるので安心してお見送りができます。

ご家族が漏出液に触れてしまう危険性を減らすことが出来るので、感染を予防するうえでも効果的だと思いました。

セーフティセットプラス アプリケーター（メモリーシオン入）



ご遺体用メイク製品「メモリーシオン」をセットした製品もございます。

セーフティセット腔用 アプリケータータイプ



腔からの体液漏出を防止する製品です。

導入後は、使用方法の説明会を随時行っておりますので、ご安心ください。

製造販売元

 **Humex** 株式会社ヒュー・メックス

本 社
〒733-0012 広島市西区中広町三丁目3-21
TEL.082-532-0361 FAX.082-295-6284

工 場
〒738-0039 広島県廿日市市宮内工業団地3-2
TEL.0829-38-7303 FAX.0829-38-7304

<https://www.hum.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ・ご相談・ご質問は
下記連絡先までお気軽にお問合わせください。

082-532-0361